

Simple d'utilisation, rapide, efficace et indolore

LIQUIBAND® OPTIMA en pratique quotidienne

UTILISATION

- Plaies franches, récentes, superficielles (ne dépassant pas la membrane basale)
- Plaies dont il est facile de rapprocher les berges
- Plaies non lacérées, sans risque infectieux

ATTENTION ! NE PAS UTILISER

- En usage interne ou sous-cutané
- Sur cheveux (collage définitif des cheveux entre eux)
- Sur zones de tension (articulations...)
- Sur muqueuses, sur l'œil
- Sur plaies hachurées
- Sur plaies infectées ou à fort risque infectieux
- Sur plaies par morsure humaine ou animale (même sur le visage)
- Sur plaies contuses avec délabrement, plaies présentant des signes de gangrène, des plaies chroniques ou de décubitus
- Sur plaies par déchirement ou dévitalisées
- Sur plaies hémorragiques
- Si ATCD de chéloïde
- Si diabète déséquilibré
- Si hypersensibilité connue aux cyanoacrylates


BÉNÉFICES

- Indolore à la pose
- Pas d'anesthésie locale
- Barrière antibactérienne
- Faible réaction inflammatoire
- Faible taux de complications
- Gain de temps
- Économique : pas de soins infirmiers, pas de pansement, pas de visite de contrôle pour ablation des points ou agrafes
- Peut être mouillé (modérément)
- Résultat esthétique de qualité
- Apprentissage rapide de la manipulation

LIMITES

- Exclusion de certaines plaies (voir rubrique **NE PAS UTILISER**)
- Plaies à proximité des yeux : voir * *Précaution d'emploi*
- Lien moins fort qu'une suture pendant les premières heures

Mode d'action de LIQUIBAND® OPTIMA

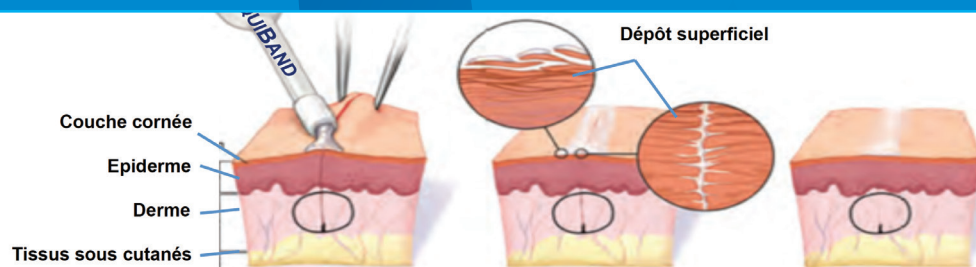

Mode d'emploi de LIQUIBAND® OPTIMA

PRÉPARATION DE LA PLAIE

- Nettoyage et désinfection, vérifier l'absence de corps étrangers
 - Vérifier que la plaie ne saigne plus
 - Vérifier le bon affrontement des berges
- * *Précaution d'emploi : si la zone concernée est proche des yeux, appliquer de la vaseline entre la plaie et la zone à protéger. Couvrir l'œil avec une compresse avant la pose de la colle sur la pointe de l'applicateur.*

PRÉPARATION DU DISPOSITIF

- Retirer LIQUIBAND® de son emballage de manière stérile
- Tenir le dispositif par ses ailettes avec la pointe de l'applicateur vers le haut à distance du patient
- Appuyer sur les ailettes pour casser l'ampoule du dispositif

CONTRÔLE DU DÉBIT DE COLLE

- Retourner l'applicateur, pointé vers le bas, toujours à distance du patient
- Contrôle du flux de colle par légères pressions sur les ailettes, éviter la formation de gouttelettes

APPLICATION

- Mettre la plaie à l'horizontal
- Affronter les berges de la plaie. Ne jamais appliquer à l'intérieur de la plaie
- Déposer un film fin de LIQUIBAND® sur toute la longueur de la plaie sans forcer en un ou deux passages maximum
- Maintenir le contact environ 10 secondes
- Jeter le dispositif dans un conteneur adapté aux déchets de soins

LIQUIBAND® OPTIMA en résumé

- Peut être mouillé
- Précision du geste (ailettes de précision)
- Efficace en 10 secondes seulement
- Totalement indolore si respect des quantités à appliquer
- Stockage à température ambiante (5°C-25°C)
- **LIQUIBAND® Optima est disponible en 0,5 ml et 0,35 ml**