



LIQUIBAND®

Fiche de conseils patients

Votre plaie a été fermée avec une colle cutanée de la gamme **LIQUIBAND®**. Elle apparait recouverte d'un film fin et dans certains cas légèrement teinté.

Il est important de prendre quelques précautions dans les jours qui suivent l'application pour une cicatrisation rapide et pour éviter les complications.



Dois-je enlever le film de colle ?

NON, le film de colle se détachera spontanément dans quelques jours (10 jours en moyenne).
NE PAS FROTTER - NE PAS GRATTER



Puis-je appliquer quelque chose sur la plaie ?

NON, NI CREME, NI POMMADE, NI PANSEMENT, mais je peux occasionnellement utiliser un pansement propre et sec pour protéger la plaie des frottements importants ou du soleil.



Puis-je me laver ?

OUI je peux me doucher rapidement et sécher la plaie **SANS FROTTER** mais **PAS DE BAIN - PAS DE PISCINE**



Puis-je bouger ?

OUI mais j'évite les activités physiques extrêmes qui pourraient léser la plaie.



Que faire en cas de rougeurs, de douleurs...

L'aspect de votre plaie vous inquiète, consulter un médecin.

Les produits de la gamme LiquiBand® sont des dispositifs médicaux de classe IIa, non inscrits sur la LPPR, avec marquage CE 2797 (évaluation de conformité établie par BSI-NL).

Les produits de la gamme LiquiBand® sont indiqués pour la fermeture des plaies cutanées franches, non souillées et récentes, dont il est facile de rapprocher les bords, ou les incisions chirurgicales.