



## Fiche de conseils patients

Votre plaie a été fermée avec une colle cutanée de la gamme **LIQUIBAND®**. Elle apparaît recouverte d'un film fin et dans certains cas légèrement teinté.

**Il est important de prendre quelques précautions dans les jours qui suivent l'application pour une cicatrisation rapide et pour éviter les complications.**



### Dois-je enlever le film de colle ?

**NON**, le film de colle se détachera spontanément dans quelques jours (10 jours en moyenne).  
**NE PAS FROTTER - NE PAS GRATTER**



### Puis-je appliquer quelque chose sur la plaie ?

**NON**, NI CREME, NI POMMADE, NI PANSEMENT, mais je peux occasionnellement utiliser un pansement propre et sec pour protéger la plaie des frottements importants ou du soleil.



### Puis-je me laver ?

**OUI** je peux me doucher rapidement et sécher la plaie **SANS FROTTER** mais **PAS DE BAIN - PAS DE PISCINE**



### Puis-je bouger ?

**OUI** mais j'évite les activités physiques extrêmes qui pourraient léser la plaie.



### Que faire en cas de rougeurs, de douleurs...

L'aspect de votre plaie vous inquiète, consulter un médecin.

Les produits de la gamme LiquiBand® sont des dispositifs médicaux de classe IIa, non inscrits sur la LPPR, avec marquage CE 2797 (évaluation de conformité établie par BSI-NL).

Les produits de la gamme LiquiBand® sont indiqués pour la fermeture des plaies cutanées franches, non souillées et récentes, dont il est facile de rapprocher les bords, ou les incisions chirurgicales.

Distributeur en France : **addmedica**

37, rue de Caumartin, 75009 Paris - question@addmedica.com  
Tél. : +33 (0)1 72 69 01 86 - Fax : +33 (0) 1 73 72 94 13

  
Fabricant : Advanced Medical Solutions