

Une gamme complète de colles cutanées à base de cyanoacrylates permettant la fermeture et la couverture des plaies ou des incisions chirurgicales dont les bords sont faciles à rapprocher, utilisables au bloc opératoire et aux urgences en fonction du type d'applicateur.


Grâce à leurs caractéristiques, les produits LiquiBand® font partie, à ce jour, des produits les plus innovants du marché des colles cutanées.



Pour les plaies franches ou les incisions chirurgicales

**EXCEED**  
Plaie grande taille (jusqu'à 30 cm)  
et **EXCEED XS**  
Plaie petite taille (jusqu'à 7 cm)

**OPTIMA MINI**  
Pour les fermetures de plaies franches et récentes

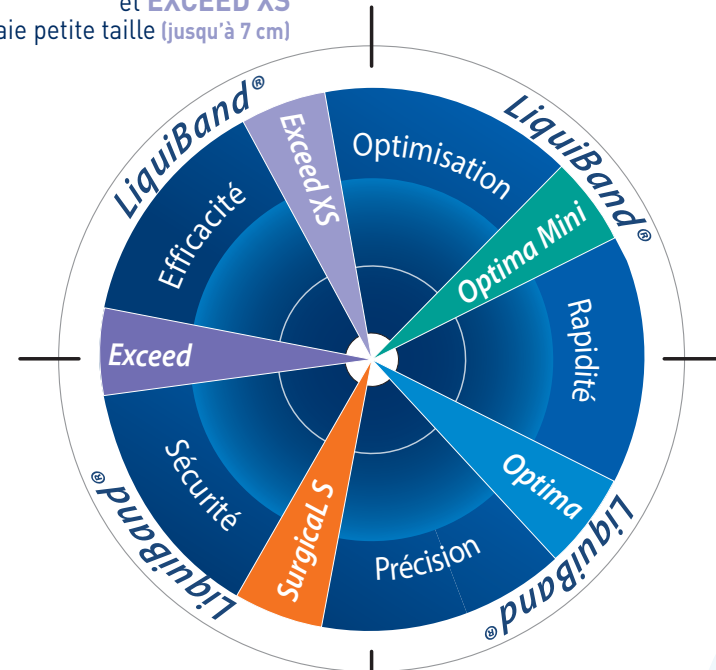

**SURGICAL S**  
Pour les petites opérations au bloc dont les laparoscopies


**OPTIMA**  
Pour les fermetures de plaies franches et récentes

# Les avantages de la gamme LIQUIBAND®

## ► Des compositions originales

Les compositions des colles conjuguent les propriétés de résistance et/ou de souplesse de différents cyanoacrylates pour s'adapter aux différents cas de fermeture et de couverture des plaies (OCA : Octyl Cyanoacrylate, BCA : Butyl Cyanoacrylate).

### Une gamme de compositions

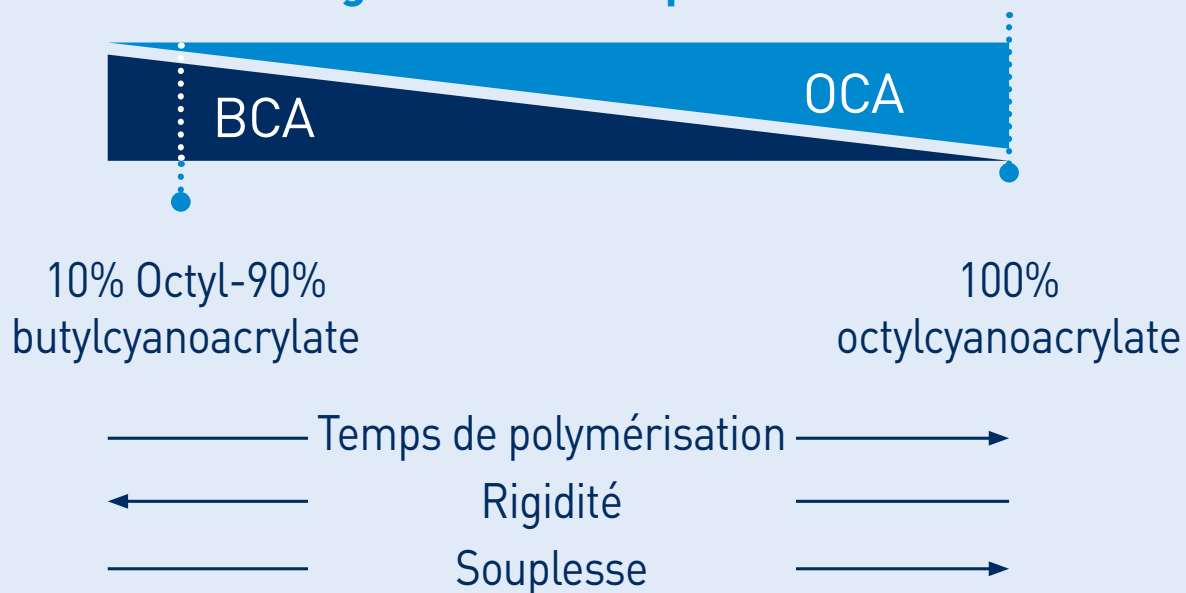

# Les avantages de la gamme LIQUIBAND<sup>®</sup>

## ► Un temps opératoire minimal

Le temps de séchage est de l'ordre de 10 secondes (Optima, Optima Mini et Surgical S) à quelques minutes (60 secondes en maintenant les bords rapprochés puis 1 à 2 mns pour le séchage avec Exceed<sup>™</sup> et Exceed<sup>™</sup> XS).

## ► Pas de catalyseur

Les compositions des colles LiquiBand<sup>®</sup> polymérisent sans catalyseur par des réactions faiblement exothermiques.

## ► Forces de résistance à la réouverture

Une résistance au moins équivalente aux sutures par fils ou agrafes (Données AMS).

## ► Propriétés de barrière antibactérienne et d'imperméabilité

## ► Résultats esthétiques

Des résultats esthétiques au moins identiques à ceux obtenus avec les dispositifs classiques (sutures, agrafes)

*(Farion, Cochrane Review, 2009).*


# Les avantages de la gamme LIQUIBAND®

## ► Une précision d'application grâce à des applicateurs préassemblés et une parfaite ergonomie d'utilisation


Différents systèmes d'applicateurs sont proposés en fonction du type de chirurgie ou du type de plaie franche.

Le système d'ailettes permet de maîtriser parfaitement l'écoulement de la colle.

La présence d'un colorant dans certaines références permet de mieux visualiser le produit dans la canule et lors de son application.

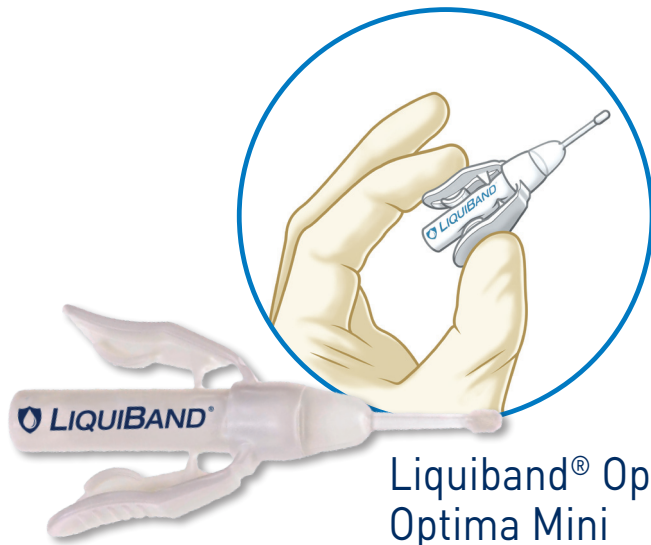

LIQUIBAND®  
LIQUIBAND® Optima,  
Optima Mini

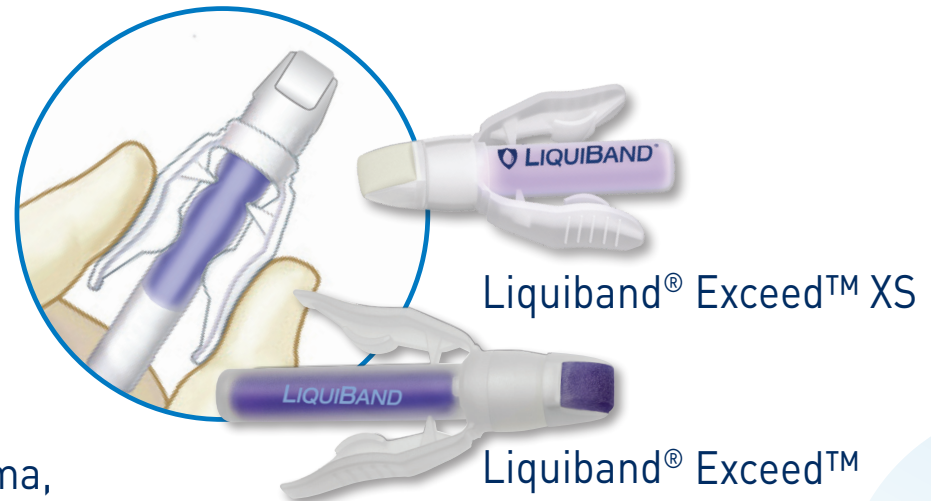

LIQUIBAND®  
LIQUIBAND® Exceed™ XS

LIQUIBAND®  
LIQUIBAND® Exceed™

# Les avantages de la gamme LIQUIBAND<sup>®</sup>

## ► Une manipulation sécurisée grâce à une technologie unique

Chaque dispositif est constitué d'un tube plastique contenant une ampoule en verre renfermant la colle. La mise en service du dispositif est réalisée par simple écrasement du corps en plastique à l'aide d'ailettes.

## ► Usage unique

Chaque dispositif est présenté dans un emballage unique stérile et déjà préassemblé au système d'application minimisant ainsi les risques de contact entre la colle et l'opérateur.

## ► Un stockage à température ambiante (5°C - 25°C)



# Les avantages de la gamme LIQUIBAND®

## ► Produits de la Gamme LiquiBand®

Dispositifs médicaux de classe IIa - Dispositifs médicaux non inscrits sur la LPPR

	LIQUIBAND® AU BLOC OPÉRATOIRE			
	SURGICAL S clear	SURGICAL S violet	EXCEED	EXCEED XS
Code	LBSSC0006	LBSS0001	72014002	72014020
Composition en % OCA-BCA	10-90	10-90	100-0	100-0
Colorant	Non	Violet	Violet	Violet
Caractéristiques	Tube à ailettes à 2 applicateurs : • Fin pour la fermeture • Large pour la couverture		Tube à ailettes avec applicateur large pour fermeture et couverture	
Volume	0,8 ml		0,8 ml	0,4 ml
Temps de séchage	10 s		Maintenir les bords de la plaie pendant 60 s	
Utilisation	Bloc opératoire : utilisation pour petite chirurgie (laparoscopique par exemple)		Pour les plaies franches ou incisions chirurgicales	
			Jusqu'à 30 cm	Environ 7 cm
Conditionnement	6 unités		6 unités	
Stockage	5°-25°C			

# Les avantages de la gamme LIQUIBAND®

## ► Produits de la Gamme LiquiBand®

Dispositifs médicaux de classe IIa - Dispositifs médicaux non inscrits sur la LPPR

	LIQUIBAND® AUX URGENCES	
	OPTIMA	OPTIMA Mini
Code	OPT001	OPT002
Composition en % OCA-BCA	10-90	10-90
Colorant	Non	Non
Caractéristiques	Tubes à ailettes avec applicateur fin pour fermeture et couverture	
Volume	0,5 ml	0,35 ml
Temps de séchage	10 s	
Utilisation	Suture de plaies fraîches et récentes en urgence	
Conditionnement	10 unités	
Stockage	5°-25°C	

CE 2797

Evaluation de conformité établie par BSI-NL.

Pour plus d'informations, consultez les notices spécifiques à chaque produit ou le site [www.liquiband.fr](http://www.liquiband.fr)